

れいわの糸でんわ[®] 取扱説明書

お買い上げありがとうございました。

本製品は、現役のケアマネージャーがコロナ禍の中、マスク越しフェースシールド越しの高齢者との対面の声がなかなか聞き取りにくく、会話やコミュニケーションがスムーズに行えないことから昔ながらの親しみやすい糸でんわの使用感を保ちつつ、確実に会話ができる様にと考えられた商品です。

また、市販の紙コップを使用することで、簡単に手持ち部分を交換でき清潔を保つことができます。操作はスイッチの切入、ボリュームの大小のみで簡単明瞭です。介護の現場や受付など、シールド越しの対面会話にお役に立てるはずです。

ご注意

耳保護のために、紙コップは耳や顔につけずに耳を覆うように添えてください。「音量」が大きすぎると耳に衝撃を与える事があります。音量は出来るだけ小さく設定して下さい。幼児や高齢者など、自身で調整が困難な場合は特にご注意下さい。また、自然に聞こえる音より大きな音を耳に加える器具類は、難聴の進行を早める可能性があります(学術的に確認されている訳ではありません)。音量を出来る限り小さくすると共に、長時間の連続使用は避けて下さい。


稀に、長く聞こえなかった方は突然大きな音で聞こえると気分が悪くなる場合があります。万が一気分が悪くなった場合は使用を中止して下さい。

備考

ハウリング(ピーという音が出て使えない状態)が起きる場合は、音量を下げ、相手との距離を取ってください。

一般的なマイクやイヤホンでの使用も可能ですので、用途に合わせてご使用下さい。

各部の名称と機能

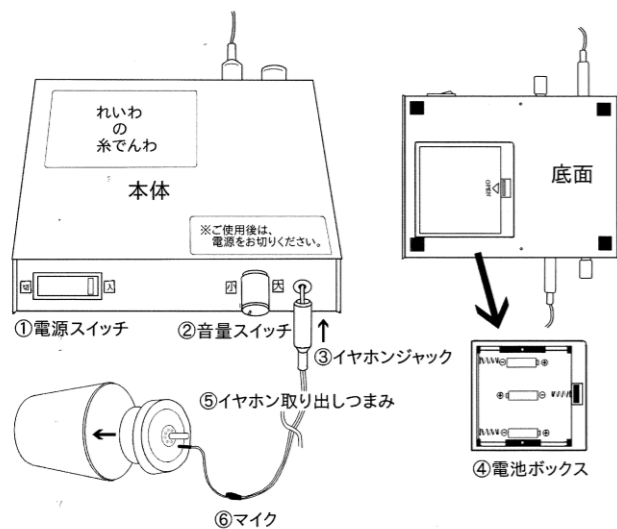

- ①電源スイッチ(正面のみ)
- ②音量スイッチ(正面、背面に各1ずつ)
- ③イヤホンジャック(正面、背面に各1ずつ)
- ④電池ボックス(底面にあります)
- ⑤イヤホン取り出しつまみ
- ⑥マイク

使い方

- ①本体の底の電池ボックスに単三電池3本を入れる
- ②イヤホンのつまみを持ち、ゆっくりとを紙コップに入れる
- ③イヤホンジャックを本体に接続する
- ④「音量」を最小にする
- ⑤電源スイッチを「入」側に押しして電源を入れる
- ⑥紙コップを耳に当てる
※マイクには口を近づけなくても十分に聞こえますので、紙コップを耳に当てずに近付けた状態でご使用下さい。
- ⑦聞きたい音が適量な音量で聞こえるように「音量」を調節する



保証書	※お客様住所
商品名: れいわの糸でんわ	
型式	※お名前
※お買い上げ日: 年 月 日	※販売元
保障期間: 1年間	株式会社 塩山

故障が発生した場合は、本紙をご呈示の上、お買い上げの販売元に修理をご依頼下さい。お買い上げの日から1年以内なら無償修理致します。※印欄に記入の無い場合は無効となりますから必ずご確認下さい。もし記入の無い場合は直ちにお買い上げの販売元にお申し出下さい。

無償修理規定

- 1.取扱説明書に従った正常な状態で故障した場合には、無償修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合は、まずは販売元へメールにてご連絡下さい。
- 3.保証期間内でも次の場合は有料となります
 - イ)誤った使用方法による故障、あるいは不当な修理や改造による故障や損傷。
 - ロ)お買い上げ後の落下等による故障や損傷。
 - ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害による故障や損傷。
 - ニ)本紙の提示がない場合。
 - ホ)本紙にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - ヘ)消耗部品を取り換える場合(例えば電池)。
- 4.本紙は日本国内においてのみ有効です。
- 5.本紙は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

この保証書は、本紙に明示した期間、条件の元において、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利が制限されることはありません。また、保証期間経過後の修理についてご不明の点がございましたら、お買い上げの販売元にお問い合わせ下さい。

会社名: 株式会社 塩山
 住所: 〒973-8402 福島県いわき市内郷御厩町三丁目41
 Eメール: care-service-salt@jewel.ocn.ne.jp